
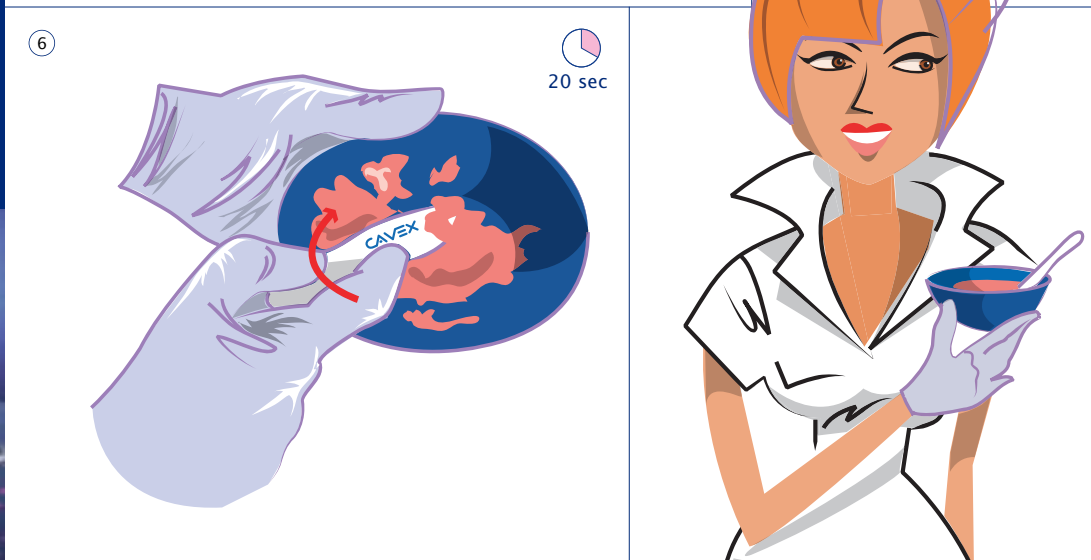
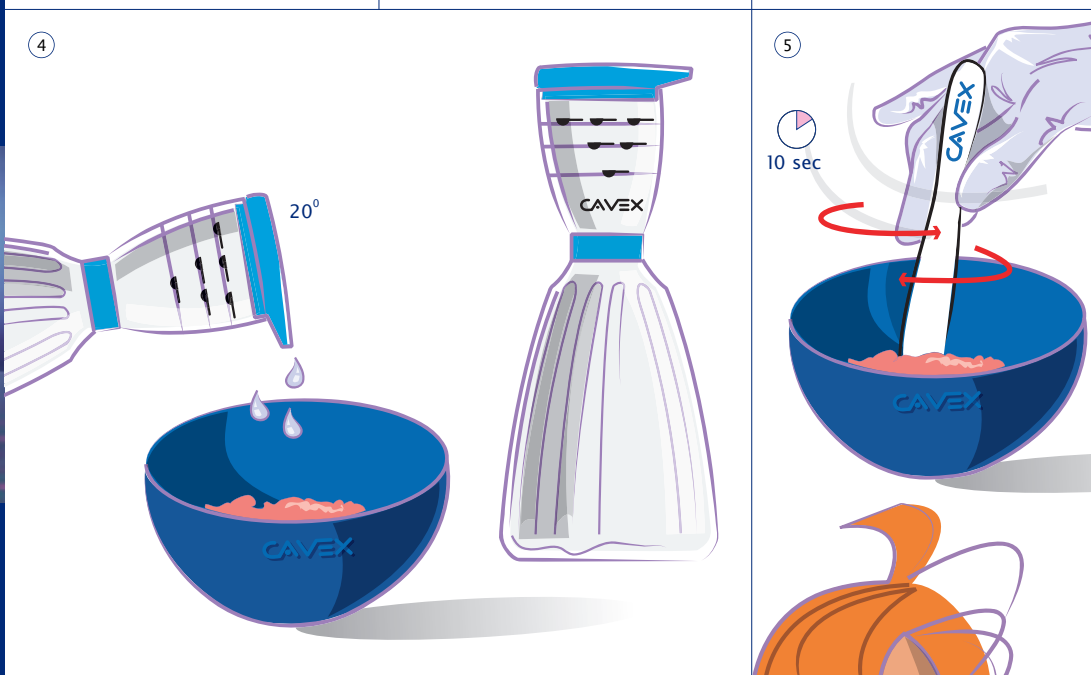


# La receta para una impresión perfecta

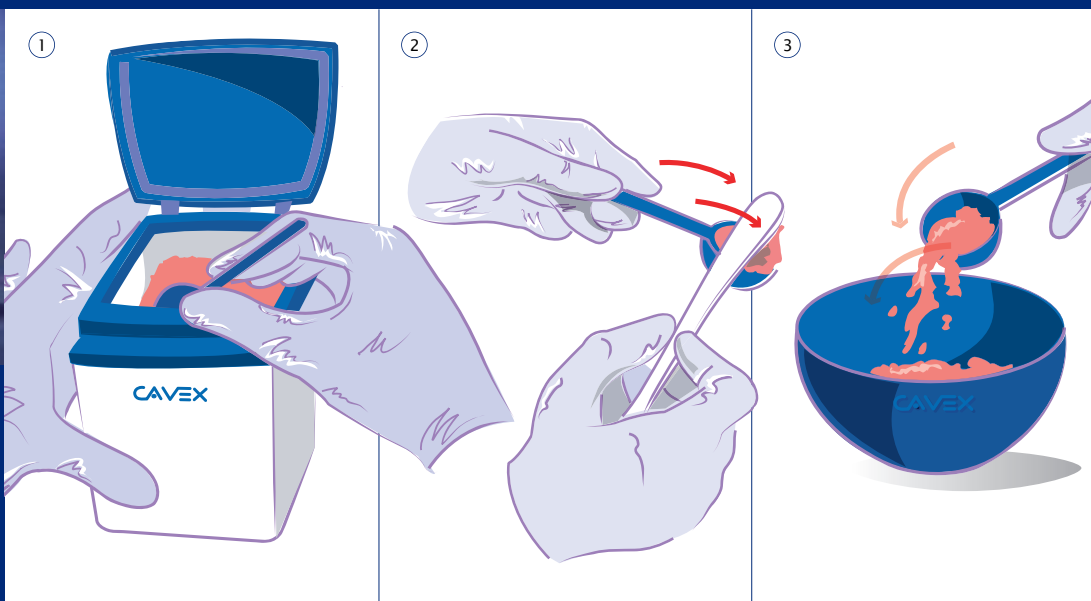

## Del polvo a la pasta

### Paso A

Para conservar el alginato en perfecto estado, guárdelo en el recipiente de almacenamiento de Cavex protegido de la luz y del aire. Empiece removiendo el polvo de alginato para desapelmazarlo.

Dosis recomendada maxilar superior



Dosis recomendada maxilar inferior



### Paso B

Tome la cantidad de polvo correcta (una cuchara de medida Cavex rasa). Añada la cantidad correcta de agua a temperatura ambiente con la botella dosificadora de Cavex.

### Paso C

Eche el polvo y el agua en la cubeta de mezcla Cavex, hecha de material flexible. Remueva durante 10 segundos hasta que se haya absorbido toda el agua. Presione la espátula con fuerza contra el lado flexible hasta que desaparezcan todos los grumos y la pasta quede perfectamente homogénea




Solicite los alginatos y accesorios Cavex a su proveedor de productos de odontología. Para más información acerca de la composición y las aplicaciones de los productos, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Cavex, en el número +31 23 530 77 00, o visite el sitio web [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl).

## De la pasta a la impresión


### Paso D

Llene la cubeta con la pasta de alginato y marque la oclusión en la cubeta con el dedo humedecido.

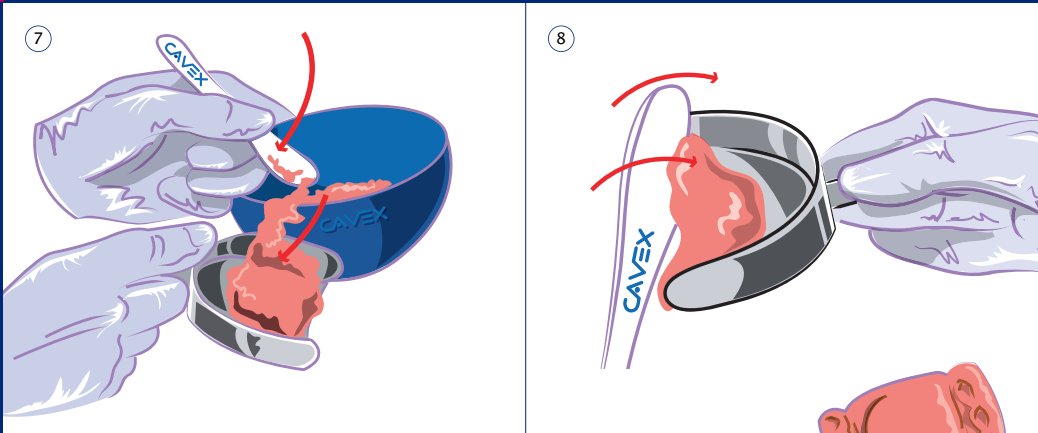


### Paso E

El dentista debe colocar la cubeta en la boca del paciente, esperar a que la pasta fragüe y luego retirar la cubeta con un movimiento rápido y suave.

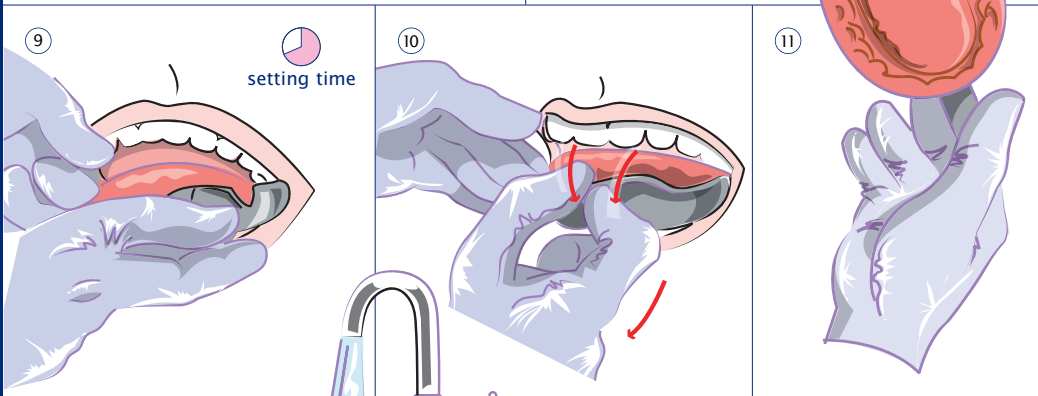

### Paso F

Enjuague la cubeta de impresión con agua fría y déle unos golpecitos secos para que se desprendan las gotas. Desinfecte la impresión, enjuáguela otra vez y golpéela suavemente contra la mano.

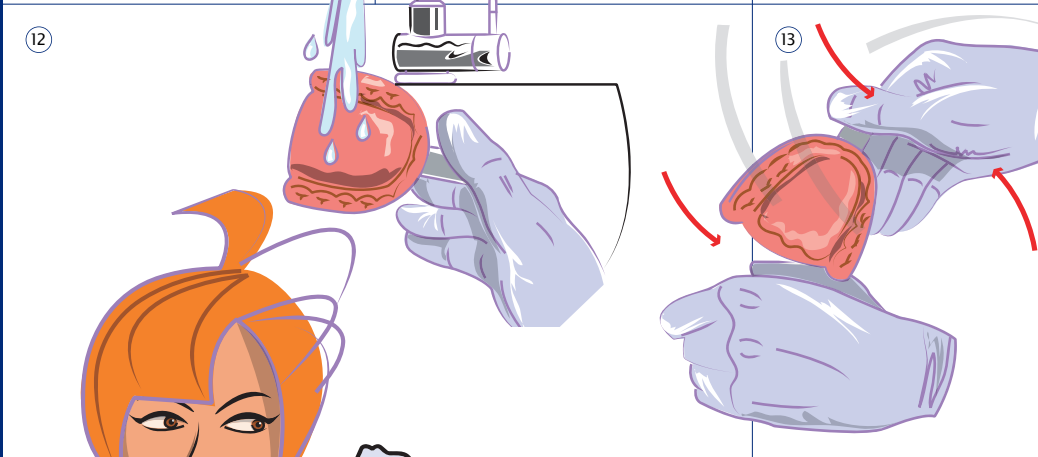

### Y el último paso: al laboratorio

Coloque la cubeta aún húmeda en una bolsa de plástico sin añadir agua, algodón húmedo ni otros humidificadores. Cierre la bolsa herméticamente para conservar la humedad atmosférica.

